

## TEST DE CONTROL DE DROGAS

Existen en el mercado diversos tipos de test de drogas, algunos más espectaculares que otros y unos cuantos que rozan la investigación policial. Piense que un test no comprobado y que ofrezca un resultado erróneo (positivo en caso negativo y viceversa) puede producir serios problemas personales, tanto a nivel emocional como profesional.

El test de **detección en sudor** requiere una cantidad de sudor suficiente para mojar la tira, teniendo que ser tomada directamente de la persona. No sirve utilizar una camiseta empapada en sudor, ni restos de otro momento, debe realizarse con sudor directamente de la frente, espalda, axilas, etc. de la persona. Si pretende realizar un análisis con estas tiras **no conseguirá hacerlo de manera discreta**.

**Enfrentarse a las drogas requiere comunicación**, por eso le recomendamos que hable con la persona y consiga su colaboración para utilizar el **Test de Drogas Personal** en orina que le presentamos, por ser rápido y sencillo, y por tener un índice de acierto superior al 98%.

## RESULTADOS EN 5 MINUTOS

El **Test Personal de Drogas** consiste en unas tiras reactivas, de utilización fácil, rápida y visual para determinar el consumo de varias drogas. El método consiste en el uso de una mezcla de anticuerpos selectivos para las distintas drogas y sus metabolitos (principios activos) obteniendo un resultado con un alto grado de sensibilidad.

Puede detectar los principales metabolitos (principios activos) de las drogas en la orina a partir de la siguiente concentración. Estas concentraciones son **iguales o mejores** a las sugeridas por el Instituto Nacional para el Abuso de Drogas de los Estados Unidos (NIDA).


Concentración mínima detectada		Tiempo de Detección	
BZO	Benzodiacepinas	1000 ng/ml	3 a 7 días
COC	Cocaína	300 ng/ml	24 a 48 horas
THC	Marihuana	50 ng/ml	3 a 7 días
MET	Meta-AnfetaminasExtasis	500 ng/ml	24 horas
MOP	Heroína Morfina	300 ng/ml	3 a 5 días

El **Test Personal de Detección de Consumo de Drogas** permite, con una muestra de orina, detectar en 5 minutos, con una precisión del 98%, el consumo de las distintas drogas, siempre que se realice en el periodo de tiempo adecuado.

## MODO DE EMPLEO E INTERPRETACIÓN

1. Lea el prospecto detenidamente.
2. No use el test si ha pasado la fecha de caducidad.
3. Abra el sobre protector con cuidado.
4. Si es posible utilice orina reciente en un bote limpio y seco.
5. Introduzca las tiras hasta la marca, NUNCA hasta el estuche.
6. Retírelas y espere unos segundos a que suba el líquido.
7. Revise el resultado del test pasados 4-5 minutos.

## TEST DE PANEL DE DOS O MÁS DROGAS

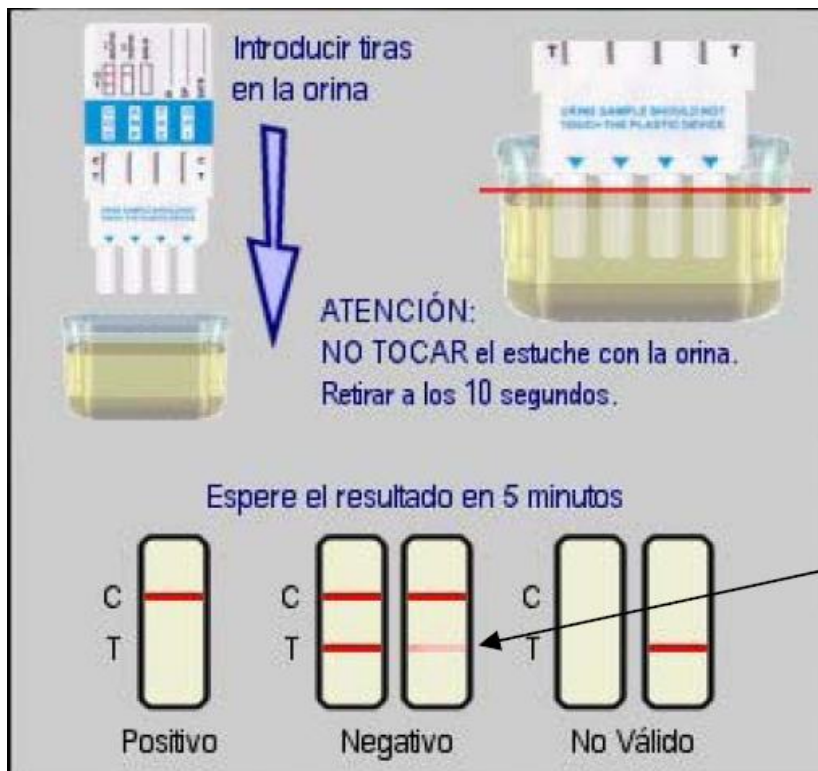



SPINREACT - PLASMATEC - HEMOSURE - PRINCETON BIOMEDITECH - ALFASCIENTIFIC - CHEMATICS - CERTEST BIOTEC

## TEST DE PANEL O CASSETTE DE UNA DROGAS

El **Test de Cocaína** y el **Test de Marihuana**, son aun más fáciles de emplear. Solo hay que seguir las indicaciones del dibujo inferior.

1 Tome una muestra de orina con el cuentagotas

2 Deposite 3 gotas

3 Espere el resultado en 5 minutos

**POSITIVO**      **NEGATIVO**      **NO VÁLIDO**

**IMPORTANTE:** SI LA LÍNEA INDICADA PRESENTA UN COLOR TENUE SE DEBE CONSIDERAR DE IGUAL FORMA UN TEST NEGATIVO

TM Roberto Contreras M.  
Product Manager

Tel:(2) 8994467 - (2) 5951833 / Fax:(2) 8994468

Movil: 8 2330619 / 7 8445625

[www.insumedica.cl](http://www.insumedica.cl)

Av Apoquindo 4634, Oficina 22 A, Las Condes, Santiago, Chile, Teléfonos (2) 8994467 / Fax:(2) 8994468

[WWW.INSUMEDICA.CL](http://WWW.INSUMEDICA.CL)